


GEBRUIKSAANWIJZING VOOR HET GEBRUIK VAN PRIKAPPARAAT EN STERIELE LANCET

318-5011100-007
Ver 1.0 2019/12


Het prikapparaat wordt gebruikt met steriele lancetten (universeel) om gemakkelijk en vrijwel pijnvrij capillair bloed uit de vingertop te halen.

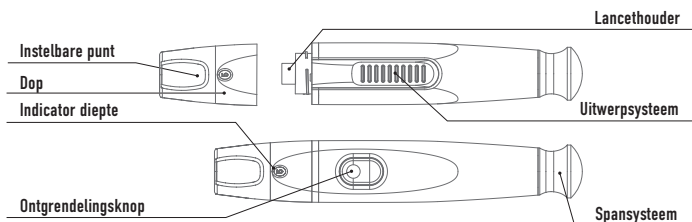


WAARSCHUWING

- ▶ Deel de lancetten en het prikapparaat niet met anderen.
- ▶ Gebruik altijd een nieuw, steriel lancet. Lancetten zijn alleen geschikt voor eenmalig gebruik.
- ▶ Zorg dat er geen handcrème, vetigheid of vuil in of op de lancetten en het prikapparaat komt.
- ▶ Het gebruikte lancet kan biologisch gevaarlijk materiaal zijn. Verwijder deze daarom volgens de daarvoor bestemde lokale voorschriften.


Vorbereiding van het prikapparaat

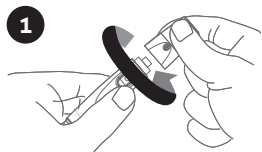


Draai de dop en trek de dop van het prikapparaat.

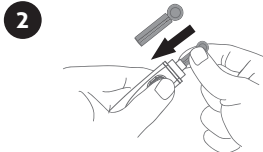


Breng het lancet in de houder en druk deze stevig aan tot het goed vastzit.

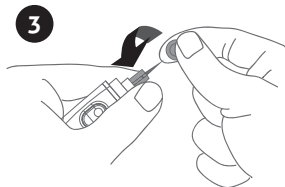


Draai het beschermplaatje van het lancet.

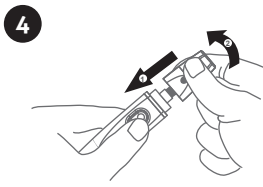

Draai de dop terug op het prikapparaat.

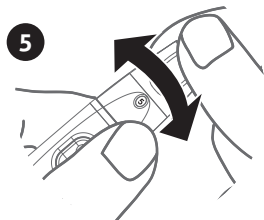

Houd uw vinger op de dop van het diepte-nummer. Selecteer de gewenste penetratiediepte door de verstelbare punt te draaien zoals afgebeeld.

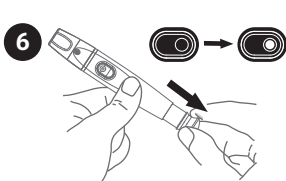

Trek de spanhendel naar achteren totdat deze klikt. U ziet een kleurverandering in de ontgrendelknop wanneer deze gereed is.

Aanpassing:


- 1 - 3 zachte tot gevoelige huid
- 4 - 6 normale huid
- 7 - 9 dikke tot eeltige huid

OPMERKING:

Voordat u een bloedprik uitvoert;

- Was uw handen goed voordat u een bloedprik uitvoert
- Droog uw handen goed na het wassen
- Kies de juiste prikplaats (bij voorkeur aan de zijkant van uw vinger)
- Wrijf de gekozen prikplaats zo'n 20 seconden voordat u prikt

7

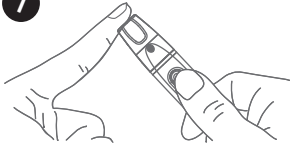

Het aanprikken van de vinger

Druk de punt van het prikapparaat stevig tegen de onderkant van uw vingertop. Druk op de ontgrendelknop om in uw vinger te prikken en een klik geeft aan dat de punctie voltooid is.


8



Verwijder het apparaat van de prikplaats.


Knijp zachtjes in het aangeprikte gebied om een druppel bloed te verkrijgen. Pas op dat u het bloedmonster **NIET** uitsmeert. Laat het bloed opzuigen in uw teststrip.

9

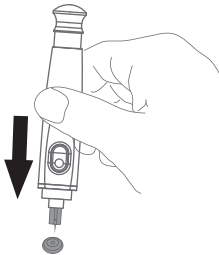

Schroef eerst de dop van de prikken los. Plaats het beschermplaatje van het lancet op een hard oppervlak en steek de lancetnaald voorzichtig in het beschermplaatje.

10

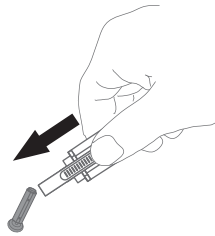

Schuif de uitwerper naar voren om het gebruikte lancet te verwijderen.

Gooi het lancet weg volgens de plaatselijke voorschriften.

Schoonmaken

Het disposable lancet is uitsluitend bedoeld voor eenmalig gebruik. Het prikapparaat is herbruikbaar.

Gebruik een milde zeep en water om het prikapparaat schoon te vegen. Spoel het apparaat **NIET** onder water.

Desinfecteer de dop door deze gedurende 10 minuten in een 70% alcoholoplossing te plaatsen en vervolgens aan de lucht te laten drogen. Plaats het apparaat **NIET** in een vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen.



TaiDoc Technology Corporation
B1-7F, No. 127, Wugong 2nd Rd., Wugu Dist.,
24888 New Taipei City, Taiwan



MedNet GmbH
Borkstraße 10, 48163 Münster, Germany

Uitleg symbolen

Symbool	Referentie
	Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing
	Fabrikant
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie
	Batchcode
	CE-markering
	Niet opnieuw gebruiken (alleen lancet)
	Te gebruiken vóór (alleen lancet)
	Gesteriliseerd door gammastraling (alleen lancet)
	Let op (alleen lancet)

Model No. of Sterile Lancet: TD-5084

Model No. of Lancing Device: TD-5011

Import Europa: HT Medical BV
Distributeur: GD Medical Pharma BV
Hastelweg 224, 5652 CL Eindhoven
info@gdmedicalpharma.nl